

कृत्रिम गर्भाधान के लिए सीमेन उपयोग दिशानिर्देश

1

सीमेन स्टॉन निकालने के लिए कैनिस्टर को उसके लिविंग नाइट्रोजन टैंक की स्थिति से फ्रॉन्ट लाइन से ठीक नीचे तक ही रखना चाहिए तथा कैनिस्टर को इस स्थिति में 10 सेकंड से अधिक नहीं रखना चाहिए।

2

सीमेन स्टॉन की 5 सेकंड से कम समय में तापमान नियंत्रित थां बाथ (Thaw Bath) में स्थानांतरित करें और इसके लिए हमेशा प्री-कूल्ड फोरसेप्स (Forceps) का ही उपयोग करें।

3

सीमेन स्टॉन को 'थां यूनिट' में 35°C - 37°C तापमान पर थां (Thaw) करें, जिसका न्यूनतम समय सेक्स सोर्टेड सीमेन के लिये गायों (Bovine) में 60 सेकंड और भैंसों (Buffalo) में 120 सेकंड होना चाहिए।

- यदि कई स्टॉन को एक साथ थां किया जा रहा है (आमतौर पर नहीं करना चाहिए), तो सुनिश्चित करें कि वे एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं।
- केवल उन्ने ही सीमेन स्टॉन को थां करें जो कि 5 मिनट के भीतर कृत्रिम गर्भाधान हेतु उपयोग किये जा सके।

4

'थां यूनिट' से स्टॉन को निकालें, साफ तौलिये से सुखाएं। दो अंगूलियों से सीलबद सिरे को पकड़कर स्टॉन को धीरे धीरे हिलाएं। स्टॉन के किसी भी अन्य भाग को नंगे हाथों से न छुए। प्लग एंड (Plug End) की तरफ से स्टॉन को गन में लोड करें।

5

स्टॉन कटर से ही स्टॉन को काटें। यदि कैंची का उपयोग काटने के लिए किया जाता है, तो सुनिश्चित करें कि स्टॉन के एयर स्पेस (Air Space) के बीच से एक समकोण (90°) पर काटा जाना चाहिए। स्टॉन कटर/कैंची को हमेशा साफ-सुधारा रखें।

6

शीथ (Sheath) को स्टॉन के कटे हुए सिरे पर से गन के ऊपर चढ़ाए और शीथ को गन पर लॉक कर दें। गन का उपयोग करते समय साफ-सुधारी रक्षात्मक शीथ (Sheath Protector) का प्रयोग करें।

7



ए.आई. गन (A.I. Gun) को साफ और सुखे कागज के तौलिये से लपेटें ताकि उसे गंदगी, नमी और तापमान में उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके।

8

स्टॉइंग हीट (Standing Heat) के पहले लक्षणों के 14-20 घंटे बाद सेक्स सोर्टेड सीमेन से कृत्रिम गर्भाधान करें।

9

पशु की आईडी, बुल की जानकारी, इस्तेमाल किये गये सीमेन का प्रकार (सेक्स सोर्टेड या पारंपरिक), ए.आई. (A.I.) की तारीख और इन्सेमिनेटर का नाम लिख कर रखें।

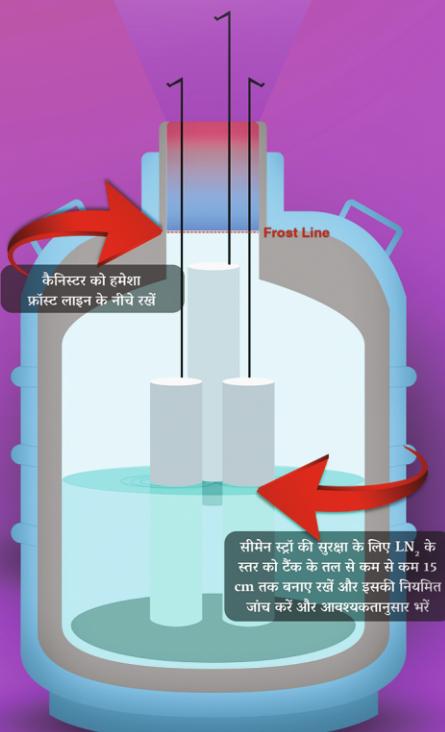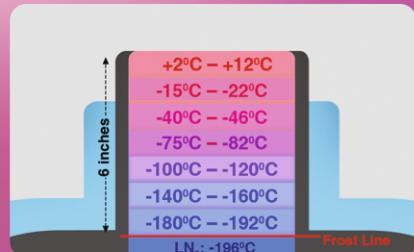

कृत्रिम गर्भाधान की सफलता के लिए ऊपर लिखे दिशानिर्देश का पालन करना अनिवार्य है।